

## BRUGERVEJLEDNING

**Remo-wax® Olie, ørespray der forebygger ørevokspropper i øret.**

### VIRKNING OG ANVENDELSE

Remo-wax Olie er en plejende olie, der forebygger ørevokspropper i øret.

Remo-wax Olie fugter også huden i øregangen og mindsker dermed kløe og irritation forårsaget af tør hud.

### BRUG IKKE REMO-WAX® OLIE HVIS

- øret er betændt eller gør ondt
- der flyder sekret ud af øret
- trommehinden er beskadiget, revnet eller er blevet punkteret (f.eks. dræn i øret)
- du er allergisk (overfølsom) overfor et af indholdsstofferne i Remo-wax Olie.

### SÆRLIGE PATIENTGRUPPER

Hvis du har koordinationsproblemer, bevægelsesforstyrrelser eller dine hænder ryster, så bed en anden om at dosere Remo-wax Olie i din øregang.

**Børn:** Remo-wax Olie bør ikke anvendes til børn under 1 år uden kontakt med lægen.

**Brugere med høreapparat:** Hvis du bruger et høreapparat, må du først sætte det i igen efter at olien er optaget af huden, dvs. når øret igen føles tørt.

### MULIGE BIVIRKNINGER

Remo-wax Olie har ingen kendte bivirkninger.

Kontakt en læge eller apoteket, hvis du har mistanke om at Remo-wax Olie har medført bivirkninger hos dig.

### DOSERINGSVEJLEDNING

**Forebyggelse af ophobning af ørevoks:** Spray 1-2 doser af Remo-wax Olie ørespray i øregangen én gang om ugen. Regelmæssig brug af Remo-wax Olie forhindrer ophobning af ørevoks. Remo-wax Olie kan anvendes så ofte det behøves.

**Behandling af tørhed og kløe i øregangen:** Spray 1-2 doser af Remo-wax Olie ørespray i øregangen én gang om ugen eller ved behov. Remo-wax Olie kan anvendes så ofte det behøves.

### SÅDAN SKAL DU BRUGE ØRESPRAYEN

1. Opvarm indholdet i sprayflasken med Remo-wax Olie til håndtemperatur (cirka 37 °C) ved at holde sprayflasken i hånden et par minutter.
2. **Før sprayen anvendes første gang**, sprayes 3-5 gange f.eks. i et papirlommetørklæde indtil der kommer en jævn stråle.
3. Træk forsigtigt den øverste del af det ydre øre bagud og opad. Hold flasken lodret med sprayens mundstykke placeret ved indgangen til øregangen. Spray 1-2 doser Remo-wax Olie i øregangen. Træk forsigtigt øreflippen op og ned med en drejende bevægelse nogle gange.
4. Overskydende olie i øregangen tørres af med et papirlommetørklæde. Brug ikke vatpinde! Den olie, der er blevet sprøjtet ind i øregangen skal ikke skylles væk.

5. Løsn sprayens mundstykke efter anvendelse, rengør det med mild sæbe, skyl det omhyggeligt med vand, tør det og sæt det på flasken igen. **Anvend aldrig sprayflasken uden at sprayens mundstykke er sat på flasken!**

#### **ANDEN INFORMATION**

Remo-wax Olie er kun til personlig brug.

Remo-wax Olie er kun til anvendelse i øregangen.

Hvis du får Remo-wax Olie ordineret af lægen skal du følge de anvisninger, du får af lægen.

Hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse af Remo-wax Olie, så kontakt lægen eller apoteket.

#### **INDHOLDSTOFFER**

Triglycerider, middelkædelængde, isopropylpalmitat, hydrogenet polydecen

#### **OPBEVARING**

Må ikke opbevares ved temperatur over 25°C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Flasken skal anvendes indenfor 6 måneder efter åbning.

#### **PAKNINGSSTØRRELSER**

Remo-wax Olie 15 ml

#### **FREMSTILLER**

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

#### **REPRÆSENTANT I DANMARK**

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

**DENNE BRUGERVEJLEDNING BLEV SENEST REVIDERET**

**12/2018**

